

## **L-Mesitran Active Large**

### Hydroaktivní krytí na rány

L-Mesitran Active je vysoce absorpční obvaz na rány, absorbuje více než 700 % tekutiny za 24 hodin. L-Mesitran Active neobsahuje žádná léčiva.

### **Indikace**

- drobné popáleniny
- povrchové řezné rány
- tržné rány a odřeniny
- jiná drobná poranění

### **Upozornění**

V případě příznaků infekce se poraďte s lékařem (zarudnutí, otok, vysoká horečka, atd.). Tento přípravek obsahuje přibližně 30 % medu. Nepoužívejte, pokud jste na med alergičtí.

### **Použití**

Před aplikací krytí ránu podle potřeby očistěte. Vyměňte sterilní přípravek ze sáčku. Odstraňte podložku, přiložte obvaz na ránu a pevně přitlačte. Pravidelně kontrolujte ránu a okolní tkáň.

L-Mesitran Active je odolný proti vlhkosti a může být nošen několik dní (3-5 dní) bez výměny.

- lze použít při sprchování
- snižuje tření
- chrání kostnaté oblasti
- přizpůsobí se tvaru těla
- vysoce absorpční
- pohybuje se s pohybem pacienta

Poslední revize textu: 14.2.2020

© Theo Manufacturing, BV, 2014

Výrobce:

Theo Manufacturing BV

Sleperweg 44

6222 NK Maastricht

The Netherlands

[www.l-mesitran.com](http://www.l-mesitran.com)

Distributor pro ČR:

LERAM pharmaceuticals s.r.o.

Páteční 7

635 00 Brno

Česká republika

[www.leram-pharma.cz](http://www.leram-pharma.cz)

